

Внутренний контроль включен в тест. Окрашенная полоса «С» является внутренним контролем и свидетельствует о надлежащей работе теста.

Тест является вспомогательным диагностическим инструментом; результаты всегда должны интерпретироваться в совокупности с клиническими данными и дополнительными диагностическими параметрами.

Набор реагентов «РАПИД-COVID-19-Антиген» указывает только на наличие/отсутствие антигена SARS-CoV-2 в биоматериале, взятом со слизистой оболочки среднего и/или нижнего носового хода в пределах чувствительности теста и не должен использоваться в качестве единственного критерия при выявлении COVID-19.

Отрицательный результат не исключает возможности инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Если результат теста отрицательный, а клинические симптомы сохраняются, необходимо провести повторное тестирование, а также дополнительное тестирование с использованием других лабораторных и/или инструментальных методов. В случае положительного результата рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Набор реагентов «РАИД-COVID-19-Антиген» должен храниться в течение всего срока годности в упаковке производителя, в закрытых помещениях в сухом прохладном месте при температуре от +2°C до +30°C и влажности не более 60 %. Не допускаются резкие колебания относительной влажности воздуха и температуры в помещении. Изделия, хранившиеся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежат.

После вскрытия фольгированной упаковки неиспользованные тест-картриджи допускается хранить при температуре от +18°C до +25°C не более 3 часов. Буферный раствор для разведения образца после вскрытия пластиковой пробирки с насадкой-капельницей с буферным раствором хранению не подлежит.

Транспортирование медицинского изделия – при температуре от -20°C до $+30^{\circ}\text{C}$ в течение не более 14 дней, транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

– Отходы класса А. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684–21.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие набора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения, установленных технической документацией предприятия-изготовителя.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «РАПИД БИО» (ООО «РАПИД БИО»).







Место производства медицинского изделия: Российская Федерация, 121205, г. Москва территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр.1, пом. 179/180.

Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 17 (14.12.2022)»


Символ	Описание
	Производитель
	Дата изготовления: год, месяц
	Температура хранения: от +2 до +30°C
	Срок годности изделия: год, месяц включительно
	Номер серии
	Каталожный номер
	Беречь от влаги
	Внимание
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Не допускать воздействия солнечного света
	Медицинское изделие для in vitro диагностики
	Обратитесь к Инструкции по применению
	Не использовать при повреждении упаковки
	Запрет на повторное применение
	Количество исследований
	Тест-картридж
	Состав набора
	Буферный раствор
	Зонд-тампон

устите таймер. Оцените
ультат реакции визуально через
нут. В течение этого периода
мени тест-картридж должен
одиться в покое — его не следует
едвигать, переворачивать и т.д.

Набор реагентов «Экспресс-тест для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-COVID-19-Антиген» по ТУ 21.20.23-011-44090553-2022

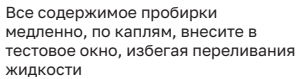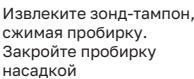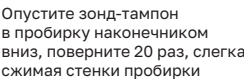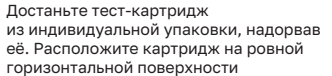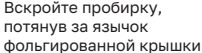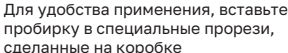

Видны 2 полосы
(полоса «Т» может быть любой яркости)

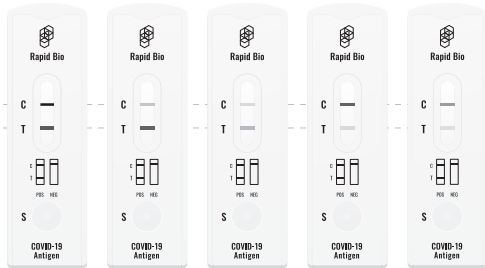


«С» —
контрольная
полоса — — — —
«Т» — тестова
полоса

Видна только полоса «С»



Нет полосы «С»

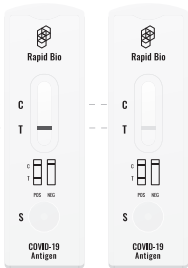

i

Если вы сомневаетесь в полученном результате, повторите тест и обратитесь за медицинской помощью